

まもる君

簡易フェイスシールド

この製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

5個入り

☑ **飛沫を防ぐ!**
Protect droplet

☑ **曇らない!**
Anti-fog function

☑ **眼鏡やゴーグル併用OK!**
Can be worn over glasses or goggles

☑ **安価で使い捨てできる!**
Inexpensive enough to be disposable




組立手順

組立動画配信中です。
右記QRコードから
ご覧ください。




パーツリスト

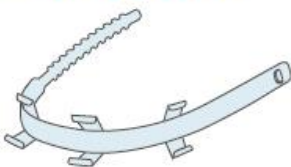

■ホルダーバンド
PET樹脂 厚み 0.3mm



■シールド
PET樹脂 厚み 0.3mm
(片面防曇加工)

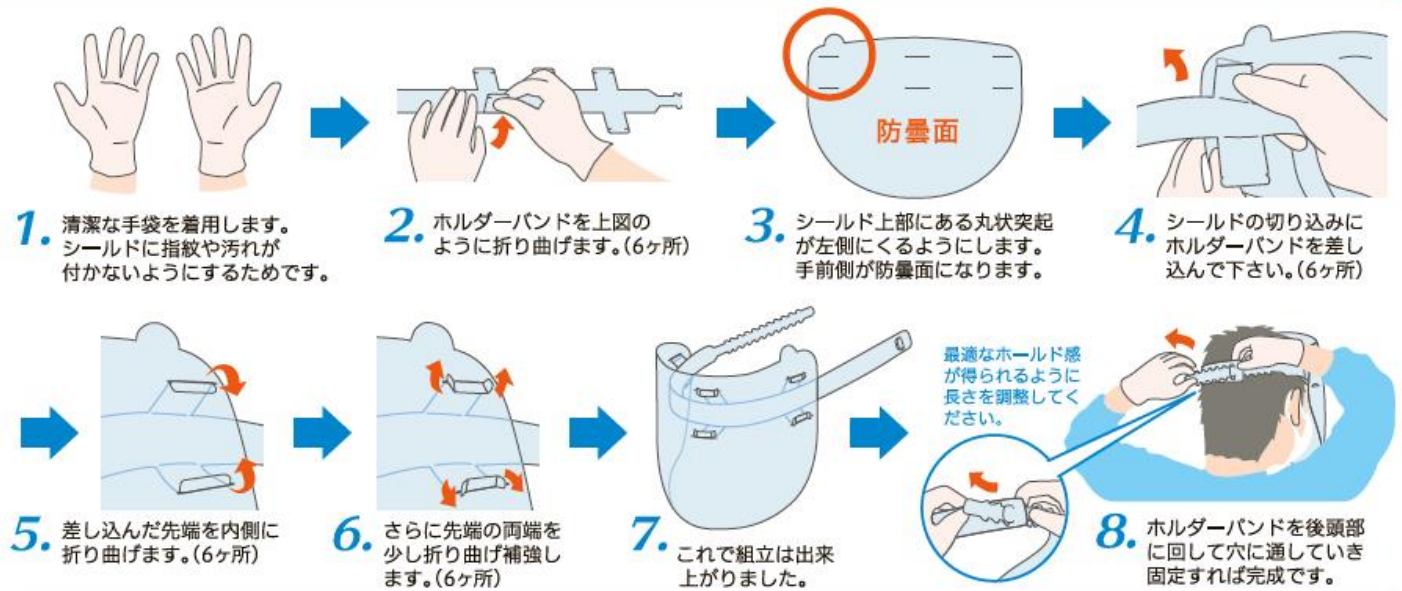

再利用の際のお手入れ方法 (本製品は使い捨てタイプですが、下記の手順に従って再利用するとより経済的です。)

- 清潔な手袋を着用します。
 - アルコール又は0.05%の次亜塩素酸を浸透させたペーパータオルやガーゼ等を使用して、シールド外側を優しく拭きます。
 - 清潔な吸収性タオルなどを用いて吸水し、良く乾燥させます。
- ※ シールド内側の汚れを拭き取る場合も、上記と同様の手順となりますが防曇効果が著しく低下する場合があります。あらかじめご了承下さい。

使用上の注意

警告	<p>改造・修理をしない。 けがや失明の恐れがあります。</p> <p>お子様には使用しない。 けがや窒息の恐れがあります。</p> <p>本製品を装着した状態で顔を火に近づけない。 本製品に燃え移り火傷をする恐れがあります。</p> <p>本製品を装着した状態でタバコを吸わない。 本製品に燃え移り火傷をする恐れがあります。</p> <p>強風下で使用しない。 本製品が破損し、けがや失明の恐れがあります。</p>	注意	<p>製品端面のエッジを強く触ったり、体や顔に押し付けしないでください。 エッジで手や顔、身体を切る恐れがあります。</p> <p>熱湯や水をかけない。 本製品の変形や、防曇効果が低下する恐れがあります。</p> <p>本製品を振り回したり投げたりしない。 けがをする恐れがあります。</p> <p>本製品を装着した状態で走ったり激しい運動をしない。 けがや本製品の変形・破損の恐れがあります。</p>
	<p>必ず実行</p> <p>この取扱説明書に記載している組立方法に従って正しく組立を行う。 誤って組立てた製品を装着すると、けがや失明の恐れがあります。</p> <p>本製品を着用中にめまいや息切れなど体調に異変を感じた時は直ちに使用をやめ安静にする。 転倒してけがをする恐れがあります。</p>		<p>必ず実行</p> <p>シールド面に傷がついたり、透明度が低下した場合は新しいものと交換する。 そのままご使用すると目の疲労や破損の原因になります。</p> <p>本製品を着用中にかゆみや肌に異変を感じた時は、直ちに使用をやめる。 肌を痛める恐れがあります。</p> <p>本製品の洗浄および消毒を行う場合は必ず手袋を着用してください。 製品端面のエッジで手を切る恐れがあります。</p>